

Evakuační podložka

dohnal[®]
matrace

Navrženo a vyvinuto pro maximální pohodlí

RYCHLÁ A BEZPEČNÁ EVAKUACE PACIENTŮ

- **Rychlá evakuace pacientů** v případě požáru či jiného nebezpečí
- K evakuaci pacienta **stačí jediná osoba**
- Dlouhá ucha pro **bezpečný a pohodlný** přesun pacienta do bezpečí
- Nepřekáží při každodenním stlaní postele
- Snadno klouže na mokrém i suchém povrchu
- Bezpečnostní popruhy zajišťují pacienta během evakuace
- **Nezabarvuje** hygienické matrace
- **Ohnivzdorné**, v souladu s předpisy BS 7175





90×200 (zvláštní šířky na vyžádání)



OEKO-TEX[®]
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
03/21/2018 HOMEROSTON WATTE
Tested for harmful substances,
www.oeko-tex.com/standard100



  matracedohnal
www.dohnal-matrace.cz

Návod k použití


1



Umístěte podložku mezi **matrací a postel**.

Upevněte bezpečnostní popruhy kolem pacienta. **Bezpečnostní popruhy** pevně zajišťují pacienta během evakuace.

2

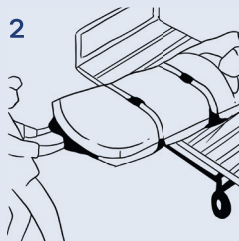


Uchopte ucha u nohou postele a otočte matrací o 90°.

3



Přesuňte pacienta na podlahu a tažením ho přemístěte k **místu shromáždění** při evakuaci.

4

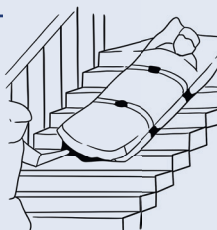

Během evakuace by měl být pacient tažen **nohama napřed**, a to jak na podlaze, tak při sestupu po schodech, aby se minimalizovalo riziko zranění pacienta.

Dlouhá ucha na obou koncích matrace umožňují personálu držet **ergonomickou polohu zad**, což snižuje riziko poranění zad zdravotníka při evakuaci pacienta.

Boční ucha pomáhají personálu matraci zvedat a pohybovat jí vodorovně.



Evakuační podložka

Detail produktu

dohnal[®]
matrace



V případě zájmu nebo jakýchkoliv dotazů prosím využijte některý z níže uvedených kontaktů

☎ 571 618 270

✉ info@dohnalmatrace.cz

📍 Kunovice 146

756 44 Loučka, Česká republika

📱 [matracedohnal](https://www.facebook.com/matracedohnal)
www.dohnal-matrace.cz